

Istruzioni per il prelievo di cellule buccali

Prima della raccolta del campione leggere attentamente tutte le istruzioni

A che cosa serve?

Questo test è utilizzato per il prelievo di DNA umano da cellule buccali. Il test non è invasivo e risulta completamente indolore, oltre ad essere estremamente semplice e veloce.

Contenuto della confezione

Kit di autoprelievo contiene:

- un tampone buccale per l'individuo che si sottopone al test;
- etichette con codice a barre;
- busta per spedizione;
- Etichetta BRT di reso per rientro campione in laboratorio

Metodi di conservazione

Il kit non ancora utilizzato può essere conservato a temperatura ambiente.

Una volta eseguito il prelievo, il campione può essere conservato a temperatura ambiente.

Cosa inserire nella scatola da spedire

- il tampone buccale;
- il modulo raccolta dati con consenso autorizzativo compilato in tutte le sue parti;
- la fotocopia della tessera sanitaria o di un documento di identità in corso di validità.

Metodo di pagamento

È possibile effettuare il pagamento PayPal, carta di credito e bonifico bancario.

Metodo di spedizione del kit al laboratorio

1. Chiudere il kit all'interno della busta del corriere
 2. Applicare esternamente al plico l'etichetta adesiva BRT fornita
 3. Collegarsi al sito <https://bit.ly/dnasalusfermopoint> per ricercare il BRT-fermopoint prescelto
 4. Consegnare il pacco al BRT-fermopoint
- Per verificare il tracking, inserire il codice della lettera di vettura BRT collegandosi al sito: <https://bit.ly/dnasalustracking>
 - Non puoi consegnare il pacco ad un BRT-fermopoint e hai bisogno di un ritiro del corriere a domicilio?
1. Collegati al sito <https://bit.ly/dnasalusritiro> per generare la richiesta di ritiro
 2. Compila tutti i campi richiesti e inserisci come pagante **DNA Salus**, come dati del destinatario **SALUS S.R.L. - M. CRAPANZANO, 26 - 92015 RAFFADALI (AG)**
- come peso del collo 0,5 kg
 - descrizione: Merce Campione umano esente

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE REFERTI ONLINE

Per consultare il referto relativo alla prestazione richiesta, dovrà seguire questa procedura:

1. Accedere al sito www.dnasalus.it
2. Cliccare su **"Referti On Line"** nella barra del menù in alto
3. Cliccare su **"Accesso Pazienti"**
4. Inserire il **CODICE UTENTE** e **PASSWORD**: il codice utente è fornito da DNA Salus, non è modificabile ed è riportato sull'etichetta nel retro del presente modulo. La password è inviata via SMS al numero di cellulare che ha indicato nel modulo accettazione.

IMPORTANTE!

Indicare chiaramente il numero di cellulare nel modulo di accettazione. Se non verrà fornito un corretto numero di telefono non sarà possibile ricevere il referto. Non sono previste altre modalità di invio: né via mail, né via posta ordinaria.

5. Consultare la risposta al test effettuato e consultare il laboratorio allo **+39 333 9811407** per qualsiasi ulteriore richiesta o prenotazione di altra prestazione.


N.B. CONSERVARE E NON RESTITUIRE QUESTE ISTRUZIONI PER POTER ACCEDERE AL REFERTO.

*Attenzione a non inserire spazi vuoti tra le parole che compongono il codice utente;


*Rispettare l'uso delle MAIUSCOLE e delle minuscole.

Procedura di raccolta del campione


È necessario seguire pedissequamente ogni passaggio indicato nel presente foglio.

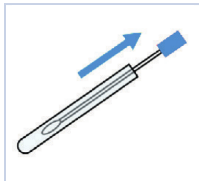

1. Sfilare il tampone buccale dalla provetta trasparente.

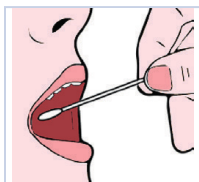

2. Introdurre il tampone all'interno della bocca e strofinarlo energicamente sulla mucosa di entrambe le guance (circa 20 volte per guancia).

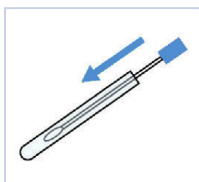

3. Riporre subito il tampone nella provetta e spezzare l'asta di plastica in corrispondenza del segno. Chiudere la provetta e apporre l'etichetta identificativa scrivendo a penna a chi si riferisce il prelievo.

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
Inserire il tampone etichettato all'interno della scatola del kit, ed allegare modulo consenso informato debitamente firmato in ogni sua parte.

Spedire il kit inserendo nella busta di spedizione.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

- Conservare i campioni a temperatura ambiente e spedirli al massimo entro 2 giorni dal prelievo.
- In caso di ripetizione dell'analisi per scarsa qualità del campione la differenza da pagare è di 69€, comprensivo di spese di spedizione e del kit di prelievo.
- Non usare nessun componente del kit dopo la data di scadenza.

CODICE UTENTE



ATTENZIONE

Conservare il tampone a temperatura ambiente se spedito in laboratorio entro 24 ore dalla raccolta. È necessario mantenerlo refrigerato se spedito in laboratorio entro le 48 ore dalla raccolta.

DNA Salus

Test del DNA · Semplici, Sicuri e Veloci

SALUS S.R.L.
M. Crapanzano, 26
92015 Raffadali (AG)

www.dnasalus.it
info@dnasalus.it
tel. +39 333 9811407



Azienda Certificata ISO 9001:2015
Struttura Sanitaria Accreditata