

CODICE UTENTE



Istruzioni per il test Intimity (MST)

Prima della raccolta del campione leggere attentamente tutte le istruzioni

A che cosa serve?

Questo test è utile per diagnosticare la presenza di malattie sessualmente trasmissibili rilevabili attraverso la ricerca del DNA del patogeno come la Clamidia, Gonorrea, Sifilide, Tricomonas, Gardnerella, Mycoplasma Genitalium, Ureplasma Urcaliticum, Ureaplasma Parvum.

Contenuto della confezione

Kit di autoprelievo contiene:

- tampone interno;
- busta per spedizione;
- sacchetto biohazard;
- Etichetta BRT di reso campione in laboratorio

Metodi di conservazione

Il kit non ancora utilizzato può essere conservato a temperatura ambiente.

Una volta eseguito il prelievo, il campione può essere conservato a temperatura ambiente.

Cosa inserire nella scatola da spedire

- sacchetto biohazard contenente il tampone;
- il **modulo** raccolta dati con consenso autorizzativo **compilato in tutte le sue parti**;
- la ricevuta di avvenuto pagamento se con bonifico bancario;
- la fotocopia della tessera sanitaria o di un documento di identità in corso di validità.

Metodo di pagamento

È possibile effettuare il pagamento PayPal, carta di credito o bonifico bancario.

Metodo di spedizione del kit al laboratorio

1. Chiudere il kit all'interno della busta del corriere
 2. Applicare esternamente al plico l'etichetta adesiva BRT fornita
 3. Collegarsi al sito <https://bit.ly/dnasalusfermopoint> per ricercare il BRT-fermopoint prescelto
 4. Consegnare il pacco al BRT-fermopoint
- Per verificare il tracking, inserire il codice della lettera di vettura BRT collegandosi al sito: <https://bit.ly/dnasalustracking>
 - Non puoi consegnare il pacco ad un BRT-fermopoint e hai bisogno di un ritiro del corriere a domicilio?
 1. Collegati al sito <https://bit.ly/dnasalusritiro> per generare la richiesta di ritiro
 2. Compila tutti i campi richiesti e inserisci come pagante **DNA Salus**, come dati del destinatario **SALUS S.R.L. - M. CRAPANZANO, 26 - 92015 RAFFADALI (AG)**
 - come peso del collo 0,5 kg
 - descrizione: Merce Campione umano esente

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE REFERTI ONLINE

Per consultare il referto relativo alla prestazione richiesta, dovrà seguire questa procedura:

1. Accedere al sito www.dnasalus.it
2. Cliccare su **"Referti On Line"** nella barra del menù in alto
3. Cliccare su **"Accesso Pazienti"**
4. Inserire il **CODICE UTENTE** e **PASSWORD**: il codice utente è fornito da DNA Salus, non è modificabile ed è riportato sull'**etichetta nel retro del presente modulo**. La password è inviata via SMS al numero di cellulare che hai indicato nel modulo accettazione.

IMPORTANTE!

Indicare chiaramente il numero di cellulare nel modulo di accettazione. Se non verrà fornito un corretto numero di telefono non sarà possibile ricevere il referto. Non sono previste altre modalità di invio: né via mail, né via posta ordinaria.

5. Consultare la risposta al test effettuato e consultare il laboratorio allo **+39 333 9811407** per qualsiasi ulteriore richiesta o prenotazione di altra prestazione.

N.B. CONSERVARE E NON RESTITUIRE QUESTE ISTRUZIONI PER POTER ACCEDERE AL REFERTO.

*Attenzione a non inserire spazi vuoti tra le parole che compongono il codice utente;

*Rispettare l'uso delle MAIUSCOLE e delle minuscole.

ATTENZIONE

Conservare il tampone a temperatura ambiente se spedito in laboratorio entro 24 ore dalla raccolta. È necessario mantenerlo refrigerato se spedito in laboratorio entro le 48 ore dalla raccolta.

DNA Salus

Test del DNA · Semplici, Sicuri e Veloci

SALUS S.R.L.

M. Crapanzano, 26
92015 Raffadali (AG)

www.dnasalus.it
info@dnasalus.it
tel. +39 333 9811407




Azienda Certificata ISO 9001:2015
Struttura Sanitaria Accreditata

Test nel soggetto maschile


Procedura di raccolta del primo getto di urine

È necessario seguire pedissequamente ogni passaggio indicato nel presente foglio.


È consigliabile eseguire l'esame sulla prima urina del mattino raccogliendo il primo getto di urine con questo procedimento.

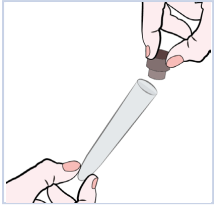

1. Stappare la provetta conica.

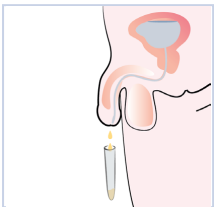

2. Raccogliere il primo getto di urina fino a 1-2 cm dal bordo.

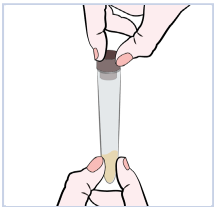

3. Richiudere accuratamente la provetta con il tappo ermetico presente nella confezione.

Apporre l'etichetta con codice a barre presente nella scatola, sulla provetta e inserire il campione all'interno della bustina biohazard.

Riporre la bustina biohazard contenente la provetta nella scatola di cartone insieme al modulo e chiuderla.

AVVERTENZE e precauzioni d'uso


- Conservare i campioni a temperatura ambiente e spedirli al massimo entro 2 giorni dal prelievo.
- Aprire la provetta solo prima del suo utilizzo.
- Richiudere la provetta assicurandosi di avere correttamente e completamente inserito il tappo di plastica onde evitare la fuoriuscita del contenuto.
- È consigliabile eseguire l'esame sulla prima urina del mattino raccogliendo il PRIMO GETTO urinario.

Test nel soggetto femminile


Procedura di esecuzione dell'auto-tampone vaginale

È necessario seguire pedissequamente ogni passaggio indicato nel presente foglio.


Il tampone vaginale è sicuro, indolore e facile da usare grazie all'ergonomica maniglia e al segno rosso su tampone che aiuterà a capire il posizionamento delle dita, e grado di profondità da raggiungere.

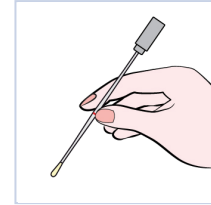

1. Posizionare le dita prima del segno rosso.

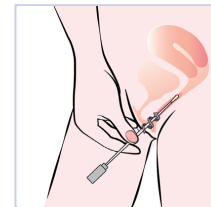

2. Inserire il tampone più in profondità possibile all'interno della vagina e ruotarlo per almeno 20 secondi. **3.** Sfilare il tampone dalla vagina continuando a ruotarlo.

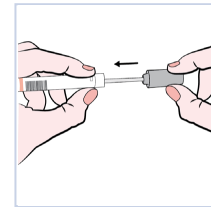

4. Inserire subito il tampone nell'apposita provetta con tappo a vite contenente il liquido di conservazione presente nella confezione e spezzare l'asta di plastica in corrispondenza del segno rosso. Chiudere il tappo a vite.

Apporre l'etichetta con codice a barre presente nella scatola, sulla provetta e inserire il campione all'interno della bustina biohazard.

Riporre la bustina biohazard contenente la provetta nella scatola di cartone insieme al modulo e chiuderla.

AVVERTENZE e precauzioni d'uso

- Conservare i campioni a temperatura ambiente e spedirli al massimo entro 2 giorni dal prelievo.
- Non bagnare il tampone.
- Non toccare il tampone con le mani.
- Il tampone è sterile; aprirlo solo poco prima del suo utilizzo.
- Non appoggiare il tampone su superfici una volta eseguito. Inserirlo il prima possibile nel liquido di conservazione.
- Il tampone è previsto per un singolo utilizzo.