

Istruzioni per il test MioBioma - Vaginal Care

Prima della raccolta del campione leggere attentamente tutte le istruzioni

A che cosa serve?

Questo test confronta il microbiota in esame con quello di una popolazione di riferimento composta da migliaia di soggetti sani e lo classifica in una delle 5 comunità batteriche (CST o Community State Type) che sono state ad oggi descritte (Ravel et al. 2011).

Contenuto della confezione

- tampone interno;
- busta per spedizione;
- sacchetto biohazard.
- sigillo di garanzia anti effrazione.

Metodi di conservazione

Il kit non ancora utilizzato può essere conservato a temperatura ambiente.

Una volta eseguito il prelievo, il campione può essere conservato a temperatura ambiente.

Cosa inserire nella scatola da spedire

- sacchetto biohazard contenente il tampone;
- il modulo raccolta dati con consenso autorizzativo compilato in tutte le sue parti;
- la fotocopia della tessera sanitaria o di un documento di identità in corso di validità.

Metodo di pagamento

È possibile effettuare il pagamento PayPal, carta di credito e bonifico bancario.

Metodo di spedizione del kit al laboratorio

1. Scrivere esternamente sulla busta l'indirizzo di spedizione: **SALUS S.R.L. - M. CRAPANZANO, 26 - 92015 RAFFADALI (AG)**

2. Prenotare il ritiro con TNT-FedEx è necessario:

- Collegarsi al sito <https://bit.ly/ritiro-test-dna>.
- Selezionare "Destinatario" nel campo "Spese di spedizione a carico"
- Selezionare "in Italia" nel campo "La merce è destinata in".
- Nel campo "Dove ritirare" inserire tutte le informazioni richieste.
- Nel campo "Partita IVA/Codice Fiscale" inserire il valore 00324170844
- Inserire gli "Orari di Ritiro" (disponibilità almeno 3 ore) ed eventuali istruzioni particolari.
- Inserire la propria mail per ricevere conferma di prenotazione.
- Nel campo "Cosa ritirare" inserire "Pacchi" - "n.1" - Peso "0,5 kg" Lugh. Largh. Altezza "5-5-5".
- Verificare i dati nella finestra di riepilogo e cliccare su "Conferma" per prenotare definitivamente il ritiro.
- Inserire nella tasca esterna della busta TNT-FedEx la prima pagina della lettera di vettura già presente nel kit, avendo cura di farsi firmare la ricevuta di ritiro all'autista.
- Per verificare il tracking, inserire il codice della lettera di vettura collegandosi al sito <https://bit.ly/verifica-tracking>. La spedizione sarà tracciabile dalla sera di invio della spedizione.
- Per modificare/cancellare il ritiro collegarsi al sito <https://bit.ly/modifica-cancellazione-ritiro> accedendo con email di prenotazione e numero di ritiro (lo trova nella mail di conferma prenotazione).

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE REFERTI ONLINE

Per consultare il referto relativo alla prestazione richiesta, dovrà seguire questa procedura:

1. Accedere al sito **www.dnasalus.it**
2. Cliccare su **"Referti On Line"** nella barra del menù in alto
3. Cliccare su **"Accesso Pazienti"**
4. Inserire il **CODICE UTENTE** e **PASSWORD**: il codice utente è fornito da DNA Salus, non è modificabile ed è riportato sull'etichetta nel retro del presente modulo. La password è inviata via SMS al numero di cellulare che ha indicato nel modulo accettazione.

IMPORTANTE!

Indicare chiaramente il numero di cellulare nel modulo di accettazione. Se non verrà fornito un corretto numero di telefono non sarà possibile ricevere il referto. Non sono previste altre modalità di invio: né via mail, né via posta ordinaria.

5. Consultare la risposta al test effettuato e consultare il laboratorio allo **+39 333 9811407** per qualsiasi ulteriore richiesta o prenotazione di altra prestazione.

N.B. CONSERVARE E NON RESTITUIRE QUESTE ISTRUZIONI PER POTER ACCEDERE AL REFERTO.

*Attenzione a non inserire spazi vuoti tra le parole che compongono il codice utente;

*Rispettare l'uso delle MAIUSCOLE e delle minuscole.

Procedura di esecuzione dell'auto-tampone vaginale


È necessario seguire pedissequamente ogni passaggio indicato nel presente foglio. Il tampone vaginale è sicuro, indolore e facile da usare grazie all'ergonomica maniglia e al segno rosso su tampone che aiuterà a capire il posizionamento delle dita, e il grado di profondità da raggiungere.



1. Posizionare le dita prima del segno rosso.



2. Inserire il tampone più in profondità possibile all'interno della vagina e ruotarlo per almeno 20 secondi. 3. Sfilare il tampone dalla vagina continuando a ruotarlo.

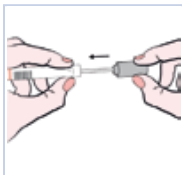

4. Inserire subito il tampone nell'apposita provetta con tappo a vite contenente il liquido di conservazione presente nella confezione e spezzare l'asta di plastica in corrispondenza del segno rosso. Chiudere il tappo a vite.

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
Apporre l'etichetta con codice a barre presente nella scatola, sulla provetta e inserire il campione all'interno della bustina biohazard.

Riporre la bustina biohazard contenente la provetta nella scatola di cartone insieme al modulo e chiuderla.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

- Non bagnare il tampone.
- Non toccare il tampone con le mani.
- Il tampone è sterile; aprirlo solo poco prima del suo utilizzo.
- Non appoggiare il tampone su superfici una volta eseguito. Inserirlo il prima possibile nel liquido di conservazione.
- Il tampone è previsto per un singolo utilizzo.

CODICE UTENTE



ATTENZIONE

Conservare il tampone a temperatura ambiente se spedito in laboratorio entro 24 ore dalla raccolta. È necessario mantenerlo refrigerato se spedito in laboratorio entro le 48 ore dalla raccolta.

DNA Salus

Test del DNA · Semplici, Sicuri e Veloci

SALUS S.R.L.
M. Crapanzano, 26
92015 Raffadali (AG)

www.dnasalus.it
info@dnasalus.it
tel. +39 333 9811407



Azienda Certificata ISO 9001:2015
Struttura Sanitaria Accreditata