

Istruzioni per il test di Paternità

Prima della raccolta del campione leggere attentamente tutte le istruzioni

A che cosa serve?

DNA profiling su tracce biologiche. Questo test è utilizzato per il riconoscimento della paternità su campioni convenzionali di DNA, a scopo informativo. Il test non è invasivo e risulta completamente indolore, oltre ad essere estremamente semplice e veloce. È possibile effettuare il test anche su campioni non convenzionali.

Contenuto della confezione

- tamponi buccali; piccoli spazzolini, uno per ogni individuo che si sottopone al test;
- etichette con codice a barre;
- busta per spedizione;
- Etichetta BRT di reso per rientro campione in laboratorio

Metodi di conservazione

Il kit non ancora utilizzato può essere conservato a temperatura ambiente.

Una volta eseguito il prelievo, il campione può essere conservato a temperatura ambiente.

Cosa inserire nella scatola da spedire

- i tamponi buccali;
- il modulo raccolta dati con consenso autorizzativo compilato in tutte le sue parti;
- la fotocopia della tessera sanitaria o di un documento di identità in corso di validità.
- scatola con campioni non convenzionali (solo se espressamente richiesto in fase di ordine).

Metodo di pagamento

È possibile effettuare il pagamento PayPal, carta di credito e bonifico bancario.

Metodo di spedizione del kit al laboratorio

1. Chiudere il kit all'interno della busta del corriere
 2. Applicare esternamente al plico l'etichetta adesiva BRT fornita
 3. Collegarsi al sito <https://bit.ly/dnasalusfermopoint> per ricercare il BRT-fermopoint prescelto
 4. Consegnare il pacco al BRT-fermopoint
- Per verificare il tracking, inserire il codice della lettera di vettura BRT collegandosi al sito: <https://bit.ly/dnasalustracking>
 - Non puoi consegnare il pacco ad un BRT-fermopoint e hai bisogno di un ritiro del corriere a domicilio?
1. Collegati al sito <https://bit.ly/dnasalusritiro> per generare la richiesta di ritiro
 2. Compila tutti i campi richiesti e inserisci come pagante **DNA Salus**, come dati del destinatario **SALUS S.R.L. - M. CRAPANZANO, 26 - 92015 RAFFADALI (AG)**
- come peso del collo 0,5 kg
 - descrizione: Merce Campione umano esente

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE REFERTI ONLINE

Per consultare il referto relativo alla prestazione richiesta, dovrà seguire questa procedura:

1. Accedere al sito www.dnasalus.it
2. Cliccare su **"Referti On Line"** nella barra del menù in alto
3. Cliccare su **"Accesso Pazienti"**
4. Inserire il **CODICE UTENTE** e **PASSWORD**: il codice utente è fornito da DNA Salus, non è modificabile ed è riportato sull'etichetta nel retro del presente modulo. La password è inviata via SMS al numero di cellulare che ha indicato nel modulo accettazione.

IMPORTANTE!

Indicare chiaramente il numero di cellulare nel modulo di accettazione. Se non verrà fornito un corretto numero di telefono non sarà possibile ricevere il referto. Non sono previste altre modalità di invio: né via mail, né via posta ordinaria.

5. Consultare la risposta al test effettuato e consultare il laboratorio allo **+39 333 9811407** per qualsiasi ulteriore richiesta o prenotazione di altra prestazione.


N.B. CONSERVARE E NON RESTITUIRE QUESTE ISTRUZIONI PER POTER ACCEDERE AL REFERTO.

*Attenzione a non inserire spazi vuoti tra le parole che compongono il codice utente;


*Rispettare l'uso delle MAIUSCOLE e delle minuscole.

Procedura di raccolta del campione


È necessario seguire pedissequamente ogni passaggio indicato nel presente foglio.

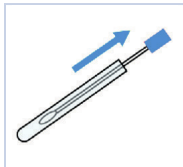


1. Sfilare il tampone buccale dalla provetta trasparente.

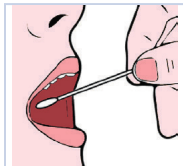

2. Introdurre il tampone all'interno della bocca e strofinarlo energicamente sulla mucosa di entrambe le guance (circa 20 volte per guancia).

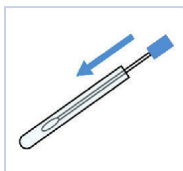

3. Riporre subito il tampone nella provetta. Chiudere la provetta e apporre l'etichetta identificativa scrivendo a penna a chi si riferisce il prelievo.

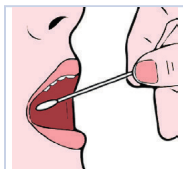

4. Ripetere l'operazione con un secondo tampone su un altro soggetto.

Inserire i tamponi etichettati all'interno della scatola del kit, ed allegare modulo consenso informato debitamente firmato in ogni sua parte.

Spedire il kit inserendo nella busta di spedizione.

È possibile anche inviare campioni non convenzionali come sangue, capelli, gomma da masticare, per il DNA profiling. Per consultare la lista completa dei campioni non convenzionali che è possibile far analizzare, la invitiamo a consultare la nostra pagina dnasalus.it/campioni-non-convenzionali/

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

- L'analisi di campione non convenzionale è da considerarsi non standard, e pertanto verrà applicato un costo aggiuntivo di 75€ per ogni campione non convenzionale inviato.
- Il tipo di campione non convenzionale che verrà inviato dovrà necessariamente essere comunicato al laboratorio al momento dell'acquisto seguendo le indicazioni fornite.
- In caso di invio di un campione non convenzionale i tempi di refertazione potrebbero subire delle variazioni; contattare il laboratorio per comunicare il tipo di campione che verrà inviato, comunicando il numero d'ordine rintracciabile sulla mail di conferma dell'ordine.

CODICE UTENTE

ATTENZIONE

Conservare il tampone a temperatura ambiente se spedito in laboratorio entro 24 ore dalla raccolta. È necessario mantenerlo refrigerato se spedito in laboratorio entro le 48 ore dalla raccolta.

DNA Salus

Test del DNA - Semplici, Sicuri e Veloci

SALUS S.R.L.
M. Crapanzano, 26
92015 Raffadali (AG)

www.dnasalus.it
info@dnasalus.it
tel. +39 333 9811407



Azienda Certificata ISO 9001:2015
Struttura Sanitaria Accreditata