

Istruzioni per il prelievo di saliva

Prima della raccolta del campione leggere attentamente tutte le istruzioni

A che cosa serve?

Questo kit è utilizzato per il prelievo di DNA umano da un campione di saliva. Il prelievo non è invasivo, è completamente indolore e si esegue in autonomia a casa in pochi minuti.

Contenuto della confezione

Kit di autoprelievo contiene:

- una provetta con imbuto e liquido di conservazione nel coperchio;
- un tappo a vite per la chiusura definitiva della provetta;
- una busta di plastica con materiale assorbente;
- etichette con codice a barre;
- busta per spedizione;
- etichetta BRT di reso per il rientro del campione in laboratorio.

Prima del prelievo

Nei **30 minuti** prima del prelievo non mangiare, non bere (tranne acqua), non fumare e non masticare gomme.

Metodi di conservazione

Il kit non ancora utilizzato può essere conservato a temperatura ambiente.

Una volta eseguito il prelievo, il campione può essere conservato a temperatura ambiente.

Cosa inserire nella scatola da spedire

- la busta di plastica con la provetta chiusa ed etichettata;
- il modulo raccolta dati con consenso autorizzativo compilato in tutte le sue parti;
- la fotocopia della tessera sanitaria o di un documento di identità in corso di validità;
- la ricevuta di avvenuto pagamento, se effettuato con bonifico bancario.

Metodo di pagamento

È possibile effettuare il pagamento PayPal, carta di credito e bonifico bancario.

Metodo di spedizione del kit al laboratorio

1. Chiudere il kit all'interno della busta del corriere.
 2. Applicare esternamente al plico l'etichetta adesiva BRT fornita.
 3. Collegarsi al sito <https://bit.ly/dnasalusfermopoint> per ricercare il BRT-fermopoint prescelto.
 4. Consegnare il pacco al BRT-fermopoint.
- Per verificare il tracking, inserire il codice della lettera di vettura BRT collegandosi al sito: <https://bit.ly/dnasalustracking>
 - Non puoi consegnare il pacco ad un BRT-fermopoint e hai bisogno di un ritiro del corriere a domicilio?
1. Collegati al sito <https://bit.ly/dnasalusritiro> per generare la richiesta di ritiro.
 2. Compila tutti i campi richiesti e inserisci come pagante **DNA Salus**, come dati del destinatario **SALUS S.R.L. - M. CRAPANZANO, 26 - 92015 RAFFADALI (AG)**.
- come peso del collo 0,5 kg
 - descrizione: Merce Campione umano esente

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE REFERTI ONLINE

Per consultare il referto relativo alla prestazione richiesta, dovrà seguire questa procedura:

1. Accedere al sito www.dnasalus.it
2. Cliccare su **"Referti On Line"** nella barra del menù in alto
3. Cliccare su **"Accesso Pazienti"**
4. Inserire il **CODICE UTENTE** e **PASSWORD**: il codice utente è fornito da DNA Salus, non è modificabile ed è riportato sull'etichetta nel retro del presente modulo. La password è inviata via SMS al numero di cellulare che ha indicato nel modulo accettazione.

IMPORTANTE!

Indicare chiaramente il numero di cellulare nel modulo di accettazione. Se non verrà fornito un corretto numero di telefono non sarà possibile ricevere il referto. Non sono previste altre modalità di invio: né via mail, né via posta ordinaria.

5. Consultare la risposta al test effettuato e consultare il laboratorio allo **+39 333 9811407** per qualsiasi ulteriore richiesta o prenotazione di altra prestazione.

N.B. CONSERVARE E NON RESTITUIRE QUESTE ISTRUZIONI PER POTER ACCEDERE AL REFERTO.

*Attenzione a non inserire spazi vuoti tra le parole che compongono il codice utente;

*Rispettare l'uso delle MAIUSCOLE e delle minuscole.

Procedura di raccolta del campione

È necessario seguire pedissequamente ogni passaggio indicato nel presente foglio.



1. Espellere una piccola quantità di saliva nell'imbuto. Picchiettare delicatamente la base della provetta su una superficie piana per consentire alla saliva di avanzare all'interno. Accertarsi che il livello della **saliva liquida, non delle bolle**, sia situato tra i numeri 1 e 2 ml.



2. Tenere la provetta verticalmente con una mano. Chiudere il coperchio dell'imbuto con l'altra mano premendo **con decisione fino a sentire uno scatto**: il liquido presente nel coperchio viene rilasciato nella provetta e si mescola alla saliva. Assicurarsi che il coperchio sia chiuso ermeticamente.



3. Tenendo la provetta verticale, svitare l'imbuto. Chiudere ermeticamente la provetta con il **tappo a vite** presente nella confezione e agitarla per 5 secondi.



4. Apporre l'etichetta con codice a barre sulla provetta e riporla nella busta di plastica contenente il materiale assorbente. **Non rimuovere il materiale assorbente dalla busta.**

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
Riporre la busta di plastica nella scatola del kit, insieme al modulo debitamente firmato in ogni sua parte.

Spedire il kit inserendolo nella busta di spedizione.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

- Un volume di saliva insufficiente può rendere il campione non idoneo: rispettare il livello indicato sulla provetta.
- Verificare che il coperchio abbia fatto scatto: se il liquido di conservazione non viene rilasciato, il campione si degrada.
- In caso di ripetizione dell'analisi per scarsa qualità del campione la differenza da pagare è di 69€, comprensivo di spese di spedizione e del kit di prelievo.
- Non usare nessun componente del kit dopo la data di scadenza.

CODICE UTENTE



ATTENZIONE

Conservare il campione a temperatura ambiente se spedito in laboratorio entro 24 ore dalla raccolta. È necessario mantenerlo refrigerato se spedito in laboratorio entro le 48 ore dalla raccolta.

DNA Salus

Test del DNA - Semplici, Sicuri e Veloci

SALUS S.R.L.
M. Crapanzano, 26
92015 Raffadali (AG)

www.dnasalus.it
info@dnasalus.it
tel. +39 333 9811407



Azienda Certificata ISO 9001:2015
Struttura Sanitaria Accreditata